

Ficha técnica Mascarilla **FFP3 - NR** Modelo **DOC-TNC**

Mascarilla de protección

≥98% filtración para la contaminación de partículas

EN 149:2001 + A1:2009 , Cumple Reglamento UE 2016/425

CE 0598

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Nombre de producto: Mascarilla de filtración

Clasificación: FFP3 NR

Modelo / Especificación: DOC-TNC, 20.8cmX18.5cm


Estándar: EN 149:2001 + A1:2009, Cumple Reglamento UE 2016/425

Composición: 55.9%: tela no-tejida, 29.4% tela fundida por soplado, 14.7% algodón de aire caliente

Condiciones de almacenamiento: Guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad inferior al 80% y sin gases corrosivos. Mantener alejadas del calor.

Aviso de alergia: Textil no tejido

Caducidad: Dos años bajo las condiciones de almacenamiento especificadas

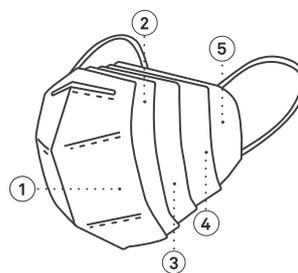

Composición

- 1., 5. : Tela no-tejida
- 4. : Algodón de aire caliente
- 2., 3. : Tela fundida por soplado



FIRMADO POR

CE 0598, EN 149:2001 + A1:2009
Cumple Reglamento UE 2016/425

INSTRUCCIONES PARA PONERSE LA MASCARILLA

1. Sujétela con una mano, con el clip nasal orientado hacia los dedos y las cintas de sujeción colgando.
2. Coloque la mascarilla sobre la cara cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la nariz.
3. Sujete la mascarilla con una mano sobre la barbilla. Tire de la cinta y colóquela detrás de la oreja.
4. Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de la mascarilla están en contacto directo con la cara.
5. Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes, modifique la posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción. Repita este proceso hasta que no detecte ninguna fuga.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Los equipos NR (No Reutilizable) no deben usarse en más de un turno de trabajo.
- Usar bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del etiquetado.
- Uso no médico. No estériles.
- Estas mascarillas no aportan oxígeno.
- No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas.
- La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir un correcto ajuste de la mascarilla.
- Mantener alejada de fuentes de calor.

IMPORTADOR:

Developing Business Trading S.L.
CIF: B-01800127
Príncipe de Vergara 62, 1º, 28006 Madrid, Spain

FABRICANTE:

Neolithic Tech Co. LTD
Building 1, No. 13, Shinan Road Nansha District, Guangzhou China

FIRMADO POR

CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE

CÓDIGO DE BARRAS

CANTIDAD: 1 ud/bolsa
SKU: FM-FFP3-1-PL-5
DIMENSIÓN: 180 x 125 mm



CANTIDAD: 30 uds (bolsas individuales)/paquete
SKU: FM-FFP3-30-PL-5
DIMENSIÓN: 200 x 175 x 125 mm



CANTIDAD: 30 uds/paquete, 30 paquetes/caja
TOTAL CANTIDAD: 900 unidades
DIMENSIÓN: 640 x 540 x 420 mm



FIRMADO POR 

